

PROCEDURA POBIERANIA WYMAZÓW z JAMY USTNEJ

1. Pacjent nie musi być na czczo, jednakże na min. 60 minut przed pobraniem materiału do badań powinien powstrzymać się od jedzenia i picia
2. Do pobierania wymazów powinny być użyte wymazówki z certyfikatem DNA free – np. firmy Sarstedt nr 80.629.
3. Osoba pobierająca wymaz powinna założyć rękawiczki jednorazowe.
4. Podpisać próbkę imieniem i nazwiskiem Pacjenta oraz datą urodzenia lub numerem PESEL lub nakleić unikalny dla Pacjenta kod kreskowy.
5. Ostrożnie wyjąć wymazówkę z próbki.
6. Przez min. 15 sekund nieustannie pocierać wewnętrzną stronę policzka wymazówką tak by zebrać na nią jak najwięcej komórek nabłonka.
7. Wymazówkę umieścić w próbce.
8. Wymazówkę wraz z wypełnionymi formularzem zlecenia wykonania badania lub skierowaniem wysłać na adres MEDGEN.

