

PB-01_I-04		INSTRUKCJA	
POBIERANIE MATERIAŁU Z TROFOBLASTU DO BADANIA GENETYCZNEGO			
WYDANIE NR 05	STRONA 1 Z 1		OBYWIAZUJE OD 01.06.2024



Opis postępowania

- 1.1 Materiał (kosmówka płodowa lub fragment tkanki płodu 1cmx1cm) pobrany w trakcie zabiegu czyszczenia jamy macicy umieszczany jest w sterylnym pojemniku.
- Uwaga:** do diagnostyki nie należy przysyłać całych płodów; wskazane jest wykonanie oceny patomorfologicznej materiału z poronienia w celu minimalizacji domieszki tkanek macicznych.
- 1.2 Przepłukać pobrany materiał 2-3 krotnie roztworem soli fizjologicznej.
- 1.3 Zalać materiał jałowym roztworem soli fizjologicznej.
- 1.4 Szczelnie zamknąć pojemnik z materiałem.
- 1.5 Opisać pojemnik w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację materiału.
- 1.6 Pobrać krew żylną (1-2 ml) od pacjentki w systemie zamkniętym w obecności wersenianu potasu (EDTA) → postępować zgodnie z „Instrukcją pobrania krwi żyłnej do badania genetycznego”.
- 1.7 Materiał należy wysłać do laboratorium w pojemniku izolacyjnym w obecności wkładów chłodzących.
- 1.8 Materiał powinien dotrzeć do laboratorium nie później niż 24 godziny po pobraniu. Do momentu dostarczenia do laboratorium materiał należy przechowywać w temperaturze poniżej 10°C (lodówka).
- 1.9 W przypadku opóźnień należy skontaktować się z laboratorium.
- 1.10 Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany przez pacjentkę dokument: Zlecenie wykonania molekularnego badania materiału z poronienia z Deklaracją świadomej zgody na wykonanie badania.